



Nouvel avertissement sur les stimulateurs cardiaques

Nous allons modifier dès que possible l'avertissement sur les stimulateurs cardiaques dans tous les **manuels d'utilisation des générateurs ultrasonores** (appareils de table et modules). La **gamme Mini LED** est également concernée.

Le nouvel avertissement sera formulé de la façon suivante :

“Des interférences peuvent survenir lorsque le système est utilisé chez des patients porteurs d'un stimulateur cardiaque.

Ce système émettant des champs électromagnétiques, il présente des risques potentiels. Il peut notamment entraîner un dysfonctionnement des dispositifs implantables tels qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implantable :

- *Avant d'utiliser ce produit, demandez aux patients et aux utilisateurs s'ils portent un dispositif de ce type. Expliquez-leur la situation.*
- *Évaluez le rapport risques/bénéfices et contactez le cardiologue de votre patient ou tout autre professionnel de la santé qualifié avant de commencer le traitement.*
- *Maintenez ce système à l'écart des dispositifs implantables.*
- *Prenez les mesures d'urgence appropriées et agissez rapidement si le patient présente des signes de malaise.*
- *Des symptômes tels qu'une augmentation du rythme cardiaque, un pouls irrégulier et des vertiges peuvent indiquer un dysfonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur implantable.”*